

INSTRUÇÕES DE USO

Iris Diluent Pack

Código REM: 02IR0205K9
Código do Fabricante: 800-3202

NOME E INTENÇÕES DE USO

O Iris Diluent é um reagente para uso diagnóstico *in vitro* com os equipamentos iQ Series e instrumentos Iris Disagnostic, utilizado para enxaguar o Iris System Cleanser do sistema fluido do equipamento. Quando identificado por meio de código de barras na posição 10 da rack de controle de qualidade sinaliza o procedimento de encerramento do equipamento.

MATERIAIS FORNECIDOS

Iris Diluent Pack	
Composição	Apresentação
Iris Diluent: água livre de partículas, sais e preservativos.	4 frascos 475 mL cada

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar de 20-28°C. Proteger do frio, calor excessivo e evaporação. Usar antes da data de vencimento.

PRECAUÇÕES

- Para uso diagnóstico *in vitro*.
- Evitar contato com olhos, pele, vestimenta e vias aéreas.
- Pode ser nocivo se ingerido ou inalado. A pele e os olhos podem ficar irritados.
- Os efeitos a longo prazo são improváveis, se o produto é usado diretamente.
- Procurar por assistência médica, se for necessário tratamento, observação e assistência. Remover a roupa contaminada. Em caso de contato com os olhos, enxaguar com água por 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão. Em caso de ingestão, procurar um médico.
- Lavar as mãos com água e sabão após o uso.
- Seguir as instruções do rótulo e do Manual do Usuário do equipamento.
- Utilizar vestimentas de proteção, incluindo luvas de vinil ou látex ou equivalente e um jaleco ou avental de laboratório. Remover os respingos com papel absorvente seco. Enxaguar a área com abundante quantidade de água.
- Para descarte, absorver com um sólido inerte ou diluir com uma grande quantidade de água e descartar em um sistema de tratamento de esgoto apropriado. Seguir todos os regulamentos locais, estaduais e federais.

PROCEDIMENTO

Adicionar de 3 - 6 mL do Iris Diluent em um tubo de ensaio e utilizar-se da rack de controle de qualidade para realização da Análise do mesmo pelo equipamento.

Fabricado por: Iris Diagnostics
(Uma Divisão da International Remote Imaging Systems, Inc.)
9172 Eton Avenue
Chatsworth, CA 91311 - EUA

Registro MS.: 80012590129
TOF Comercial Ltda.
R. Campos Sales, nº303, Sala 709. Centro - Barueri/SP.
CEP: 06411-150
CNPJ: 02.887.124/0001-66
Fone: (11) 4198-3609
Resp. Técnico: Oscar Matins Gomes Neto
CRF-SP: 44.638

Distribuído por: REM Indústria e Comércio Ltda.
Rua Columbus, 282 - Vila Leopoldina
CEP: 05304-010 - São Paulo - S.P.
Fone: (11) 3377 - 9922 Fax: (11) 3377-9900
CNPJ: 47.334.701/0001-20
Data da Revisão: Julho de 2004

Serviço de Atendimento ao Cliente:
REM Indústria e Comércio Ltda.
Rua Columbus, 282 - Vila Leopoldina
CEP: 05304-010 - São Paulo - S.P.
Fone: (11) 3377 - 9922 Fax: (11) 3377-9900
CNPJ: 47.334.701/0001-20